

★ エピカ スマートクリーンの使用方法


ご使用前に

- ・キャップの外装フィルムを矢印にそって取り除いてください。
- ・レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。




1 レンズをセット

左右のレンズホルダーにレンズをセットしてから、ケースに入れ、キャップをしっかりと閉めます。

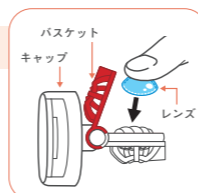


2 液を入れる

レンズホルダーのフタを開けて、くぼみ部分にノズルを垂直に押し当て、ボトル側面を軽く押ししながら水位線まで消毒液を入れます。

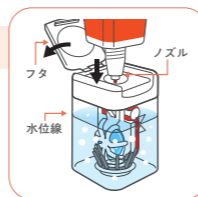

3 フタを閉じる

レンズホルダーのフタを閉じ、6時間以上放置すると消毒・中和が完了します。

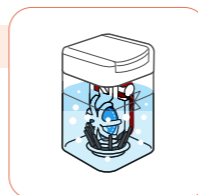

◎エピカ スマートクリーンは同梱のスマートケースによる中和が必要です。必ず同梱のスマートケースと組み合わせて使用してください。エピカ スマートクリーンを使い切る毎に、同梱の新しいスマートケースに必ず取り替えてください。◎中和が完全に終わっていない状態(消毒・中和開始後6時間未満)でレンズを装着しないでください。◎液が漏れるため、スマートケースは立てた状態で消毒・中和を行ってください。◎消毒・中和中はスマートケースを振らないでください。◎中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装着前に再度消毒・中和を行ってください。

より快適にお使いいただくために

消毒前のこすり洗い、装着前のすすぎには「メニソーク」の使用をおすすめします。



【別売】

お問い合わせはこちら

■メールでのお問い合わせ

メニコン お問い合わせ

検索

www.menicon.co.jp/ask/



■電話でのお問い合わせ

メニコンお客様センター

0120-103109

受付時間/9:00~18:00

*日・祝日を除きます。

製品情報はこちら



株式会社メニコン
www.menicon.co.jp



ソフトコンタクトレンズ用消毒剤



ソフト用
ケア

epica Smart clean

スマートクリーン

これからは、
カンタン×キレイなレンズケア。



のせて、入れて、とじるだけ “カンタン”ステップの コンタクトレンズケア

忙しい毎日を送る人々に、
寄り添うケア用品です。

「コンタクトレンズのお手入れは面倒、
でもきちんとケアはしたい」
そんな悩みを解決したいという
思いで生まれたのが
「エピカ スマートクリーン」です。
コンタクトレンズケアのストレスから解放します。



MKSCPR001IQ-20230601IQ

ソフトコンタクトレンズケアのお悩みを解決します。

epica Smart clean

スマートクリーン

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤

天然系成分配合

瞳に
やさしい

クエン酸で
タンパク
除去

泡で
しっかり
洗浄



消毒液
エピカ スマートクリーン

SMART
TOUCH


消毒専用容器
スマートケース

販売名: エピカ スマートクリーン
有効成分: 【消毒液】過酸化水素3.42w/v%
【中和樹脂】消毒専用容器に組付け1個中、白金1.0mg
配合成分: 安定剤
緩衝剤
湿潤剤
pH調整剤
等張化剤
処理時間: 6時間以上

医薬部外品

セットするだけ! “カンタン”レンズケア

STEP 1
のせて

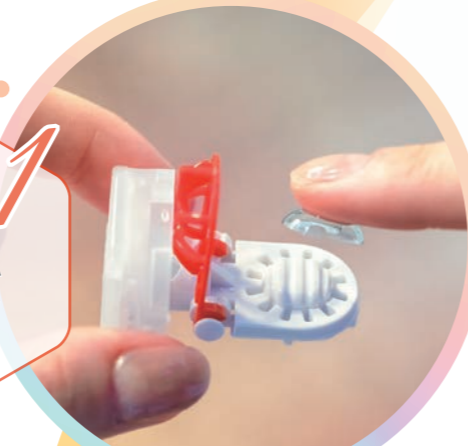

STEP 2
入れて



STEP 3
とじる



清潔

過酸化水素がしっかり消毒

過酸化水素は中和され水と酸素に分解されるため、眼にしみにくく、心地よくお使いいただけます。



クエン酸が汚れをスッカリ洗浄

酸素の泡とクエン酸が汚れをスッカリ落とします。



レンズ内面にふれずに取り出せる

SMART TOUCH

レンズを取り出す際に、レンズ内面にふれにくく、清潔・簡単に装着できるデザインを採用しています。



※レンズ内面が内側になるようにレンズをセットしてください。

すべてのソフトコンタクトレンズに 使用可能

シリコンハイドロゲルレンズを含む、すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。



レンズの中からうるおいをキープ

レンズの内部に保湿成分がしみこんでうるおいをキープします。




※うるおい感には個人差があります。


安心

誤使用防止の安心ロックノズル

中和前のエピカ スマートクリーンは強い眼刺激の原因になります。
エピカ スマートクリーンですすいでしまう誤使用をロックノズルにより防ぎます。

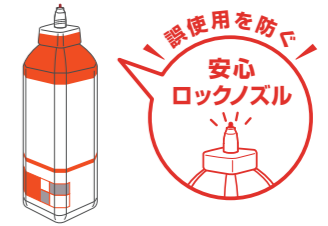

ノズルをレンズホルダーのくぼみ部分に押し当てることでエピカ スマートクリーンが出ます。

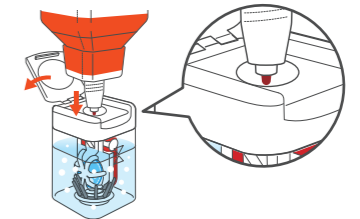

NIPPON Quality



「名水の里」として有名な岐阜県郡上市の国内自社工場で生産しています。



Present Tree®

メニコンエピカシリーズにとって水は大切な原料の一つ。そこでメニコンでは、売上の一部を、清らかな水を育む森を守る森林再生のプロジェクト「Present Tree」の支援に役立てています。

